



ATOMISEUR NASAL À L'EAU DE MER HYPERTONIQUE NETTOIE ET DÉGAGE

Sinomarin® Mini Spray 30 mL

PRODUIT STÉRILISÉ

Enfants et adultes (3 ans et plus)

DESCRIPTION : Vaporisateur nasal pour enfants et adultes, avec embout nasal anatomique. Pulvérisation à dose mesurée.

DOSAGE : 1 à 3 vaporisations dans chaque narine, 3 fois par jour ou au besoin. Lavez l'applicateur nasal après chaque utilisation.

MODE D'ACTION : Sinomarin® contient de l'eau de mer hypertonique de source naturelle (2,3 % chlorure de sodium) riche en oligoéléments et en sels minéraux. La solution assure un lavage optimal du nez et aide à maintenir les sinus en santé en éliminant l'excès de mucus.

MODE D'EMPLOI : enlevez le capuchon protecteur et suivez les instructions décrites ci-bas.

AUTO-ADMINISTRATION OU ADMINISTRATION DE SINOMARIN® À UN ENFANT

Avant d'utiliser Sinomarin®, mouchez-vous, ou mouchez le nez de l'enfant, pour enlever le mucus. Retirez le capuchon protecteur, penchez légèrement le cou vers l'avant et tournez la tête de côté. Insérez délicatement l'applicateur dans la narine du haut, pas plus profondément que ~ 0,6 cm (¼ po) et pressez brièvement. Il est recommandé d'éviter de respirer par le nez pendant la vaporisation, la respiration doit plutôt se faire par la bouche lorsque vous vaporisez afin d'éviter que la solution ne s'écoule de l'arrière du nez vers la bouche. Évitez d'avaler. Mouchez votre nez, ou celui de l'enfant. Tournez la tête du côté opposé et répétez la même opération avec l'autre narine. Lavez l'applicateur nasal après chaque utilisation.

Sinomarin® Enfants 100 mL

PRODUIT STÉRILISÉ

Enfants (3 à 13 ans)

DESCRIPTION : Atomiseur avec jet doux, pour enfants, muni d'un applicateur adapté à l'anatomie nasale.

DOSAGE : Enfants de 3 à 5 ans : une (1) vaporisation dans chaque narine, 3 fois par jour ou au besoin. Enfants de 6 à 13 ans : deux (2) vaporisations dans chaque narine, 3 fois par jour ou au besoin. Lavez l'applicateur nasal après chaque utilisation.

MODE D'ACTION : Sinomarin® contient de l'eau de mer hypertonique de source naturelle (2,3 % chlorure de sodium) riche en oligoéléments et en sels minéraux. La solution assure un lavage optimal du nez et aide à maintenir les sinus en santé en éliminant l'excès de mucus.

MODE D'EMPLOI : enlevez le capuchon protecteur et suivez les instructions décrites ci-bas.

ADMINISTRATION DE SINOMARIN® À UN ENFANT

Mouchez le nez de l'enfant pour enlever le mucus avant d'utiliser l'atomiseur Sinomarin®. Retirez le capuchon protecteur et penchez le cou de l'enfant doucement vers l'avant et tournez sa tête de côté. Insérez délicatement l'applicateur dans la narine du haut, pas plus profondément que ~ 0,6 cm (¼ po) et pressez brièvement. Demandez à l'enfant d'éviter de respirer par le nez pendant la vaporisation, mais plutôt de respirer par la bouche pour éviter que la solution ne s'écoule de l'arrière du nez vers la bouche. Dites à l'enfant d'éviter d'avaler. Mouchez le nez de l'enfant. Tournez la tête du côté opposé et répétez la même opération avec l'autre narine. Lavez l'applicateur nasal après chaque utilisation.

Sinomarin® Adultes 125 mL

PRODUIT STÉRILISÉ

Adultes et adolescents (14 ans et plus)

DESCRIPTION : Atomiseur avec jet moyen, pour adultes, muni d'un applicateur adapté à l'anatomie nasale.


DOSAGE : deux (2) vaporisations dans chaque narine, 3 fois par jour ou au besoin. Lavez l'applicateur nasal après chaque utilisation.

MODE D'ACTION : Sinomarin® contient de l'eau de mer hypertonique de source naturelle (2,3 % chlorure de sodium) riche en oligoéléments et en sels minéraux. La solution assure un lavage optimal du nez et aide à maintenir les sinus en santé en éliminant l'excès de mucus.



MODE D'EMPLOI : enlevez le capuchon protecteur et suivez les instructions décrites ci-bas.

SINOMARIN® AUTO-ADMINISTRATION

Avant d'utiliser Sinomarin®, mouchez-vous pour enlever le mucus. Retirez le capuchon protecteur, penchez légèrement votre cou vers l'avant et tournez votre tête de côté. Insérez l'applicateur dans votre narine du haut, pas plus profondément que ~ 0,6 cm (¼ po) et pressez brièvement. Évitez de respirer par le nez pendant la vaporisation, la respiration doit plutôt se faire par la bouche lorsque vous vaporisez afin d'éviter que la solution ne s'écoule de l'arrière du nez vers la bouche. Évitez d'avaler. Mouchez votre nez. Tournez la tête du côté opposé et répétez la même opération avec l'autre narine. Lavez l'applicateur nasal après chaque utilisation.

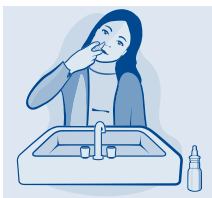

Sinomarin® Mini Spray

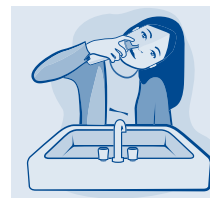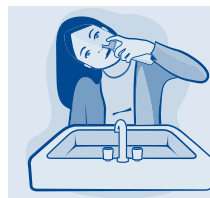

Sinomarin® Adultes & Sinomarin® Enfants

Sans agent de conservation. Sans danger pour l'environnement.

USAGE :

Dégage le nez et les sinus bloqués et aide à maintenir les sinus en santé en éliminant l'excès de mucus.

COMPOSITION :

Ingrédient médicamenteux : chlorure de sodium (provenant d'eau de mer stérilisée) 2,3 %.
Ingrédient non médicamenteux : eau purifiée.

PRÉCAUTIONS :

- ▶ N'utilisez pas le produit en cas d'allergie à l'eau de mer.
- ▶ Ne partagez pas le dispositif avec d'autres personnes.
- ▶ N'avalez pas la solution.
- ▶ Si vous, ou votre enfant, éprouvez des malaises à l'utilisation de ce produit, cessez de l'utiliser et consultez un professionnel de la santé.
- ▶ Apprenez aux enfants de moins de 12 ans comment utiliser le produit pour minimiser les risques d'ingestion.
- ▶ Consultez un professionnel de la santé si les symptômes persistent ou s'aggravent.
- ▶ Consultez un professionnel de la santé s'il n'y a pas d'amélioration après avoir essayé de dégager le nez, si le mucus est épais et jaune ou vert, si la peau à la base des narines devient très irritée ou enrouillée et/ou s'il existe d'autres signes ou symptômes de maladie comme de la fièvre ou une infection à l'oreille.
- ▶ Ne pas utiliser si les passages nasaux sont complètement bloqués ou si vous, ou votre enfant, avez une infection à l'oreille ou les oreilles bouchées.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Des sensations de picotement ou une irritation passagère peuvent apparaître en début d'utilisation.

Conserver entre 15 °C et 25 °C.

Sans agent de conservation. Sans danger pour l'environnement.

USAGE :

Dégage le nez et les sinus bloqués et aide à maintenir les sinus en santé en éliminant l'excès de mucus.

COMPOSITION :

Ingrédient médicamenteux : chlorure de sodium (provenant d'eau de mer stérilisée) 2,3 %.
Ingrédient non médicamenteux : eau purifiée.

PRÉCAUTIONS :

- ▶ N'utilisez pas le produit en cas d'allergie à l'eau de mer.
- ▶ Ne partagez pas le dispositif avec d'autres personnes.
- ▶ N'avalez pas la solution.
- ▶ Si votre enfant éprouve des malaises à l'utilisation de ce produit, cessez de l'utiliser et consultez un professionnel de la santé.
- ▶ Apprenez aux enfants de moins de 12 ans comment utiliser le produit pour minimiser les risques d'ingestion.
- ▶ Consultez un professionnel de la santé si les symptômes persistent ou s'aggravent.
- ▶ Consultez un professionnel de la santé s'il n'y a pas d'amélioration après avoir essayé de dégager le nez, si le mucus est épais et jaune ou vert, si la peau à la base des narines devient très irritée ou enrouillée et/ou s'il existe d'autres signes ou symptômes de maladie comme de la fièvre ou une infection à l'oreille.
- ▶ Ne pas utiliser si les passages nasaux sont complètement bloqués ou si votre enfant a une infection à l'oreille ou les oreilles bouchées.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Des sensations de picotement ou une irritation passagère peuvent apparaître en début d'utilisation.

Conserver entre 15 °C et 25 °C. Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l'eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C.

Sans agent de conservation. Sans danger pour l'environnement.

USAGE :

Dégage le nez et les sinus bloqués et aide à maintenir les sinus en santé en éliminant l'excès de mucus.

COMPOSITION :

Ingrédient médicamenteux : chlorure de sodium (provenant d'eau de mer stérilisée) 2,3 %.
Ingrédient non médicamenteux : eau purifiée.

PRÉCAUTIONS :

- ▶ N'utilisez pas le produit en cas d'allergie à l'eau de mer.
- ▶ Ne partagez pas le dispositif avec d'autres personnes.
- ▶ N'avalez pas la solution.
- ▶ Si vous éprouvez des malaises à l'utilisation de ce produit, cessez de l'utiliser et consultez un professionnel de la santé.
- ▶ Consultez un professionnel de la santé si les symptômes persistent ou s'aggravent.
- ▶ Consultez un professionnel de la santé s'il n'y a pas d'amélioration après avoir essayé de dégager le nez, si le mucus est épais et jaune ou vert, si la peau à la base des narines devient très irritée ou enrouillée et/ou s'il existe d'autres signes ou symptômes de maladie comme de la fièvre ou une infection à l'oreille.
- ▶ Ne pas utiliser si les passages nasaux sont complètement bloqués ou si vous avez une infection à l'oreille ou les oreilles bouchées.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Des sensations de picotement ou une irritation passagère peuvent apparaître en début d'utilisation.

Conserver entre 15 °C et 25 °C. Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l'eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C.